


Elektroaktiviertes Wasser „Anolyte neutral“ zur Wasserentkeimung in dentalmedizinischen Geräten BottleSystem

- Ca. 3% Anolyte neutral wird dem Trinkwasser in der Bottle zugesetzt.
- Dosierung bei 1500 ml Bottle

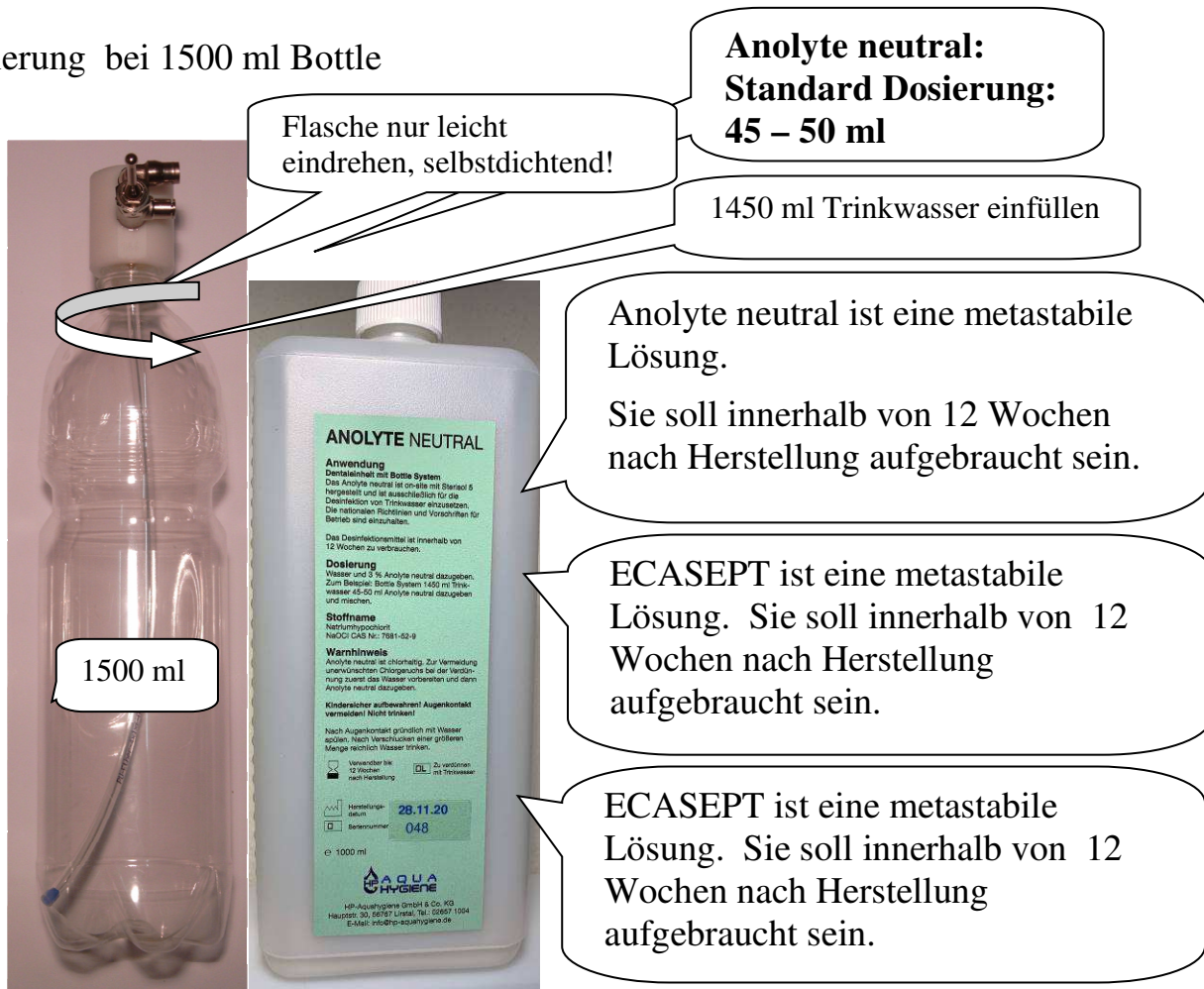

Flasche nur leicht eindrehen, selbstdichtend!

Anolyte neutral: Standard Dosierung: 45 – 50 ml

1450 ml Trinkwasser einfüllen

1500 ml

Anolyte neutral ist eine metastabile Lösung. Sie soll innerhalb von 12 Wochen nach Herstellung aufgebraucht sein.

ECASEPT ist eine metastabile Lösung. Sie soll innerhalb von 12 Wochen nach Herstellung aufgebraucht sein.

ECASEPT ist eine metastabile Lösung. Sie soll innerhalb von 12 Wochen nach Herstellung aufgebraucht sein.

ANOLYTE NEUTRAL
Anwendung
Dentbleichmittel mit Bottle System
Das Anolyte neutral ist on-site mit Steriad 5 hergestellt und ist ausschließlich für die Desinfektion von Trinkwassererzeugern. Die empfohlenen Fließzeiten und Vorschritten für Betriebe sind anzuhalten.
Das Desinfektionsmittel ist innerhalb von 12 Wochen zu verbrauchen.
Dosierung
Wasser und 3% Anolyte neutral dazugeben. Zum Beispiel: Bottle System 1450 ml Trinkwasser 45-50 ml Anolyte neutral dazugeben und mischen.
Stoffname
Natriumhypochlorit
NaOCl CAS-Nr.: 7811-02-9
Warnhinweis
Anolyte neutral ist chlorhaltig. Zur Vermeidung unerwünschter Chlorgerüche bei der Verwendung zusetzt das Wasser vorverbleiben und dem Anolyte neutral dazugeben.
Kindersicher aufbewahren! Augenkontakt vermeiden! Nicht trinken!
Nach Augenkontakt gründlich mit Wasser spülen. Nach Verschlucken einer größeren Menge reichlich Wasser trinken.
Herstelldatum: 28.11.20
Seriennummer: 048
e: 1000 ml
HP-Aquahygiene GmbH & Co. KG
Hauptstr. 30, 56767 Lirstal, Tel.: 02657 1004
E-Mail: info@hp-aquahygiene.de

**Die Bottle ist nach einen 1/2 Jahr im Gebrauch zu erneuern.
(Hygiene- und Sicherheitsaspekte)**

Für Rückfragen:

HP-Aquahygiene GmbH & Co. KG

Hauptstr. 30

D-56767 Lirstal

Fon: 02657-1004

Fax: 02657-1017

Gerd Petri

email: info@hp-aquahygiene.de

www.hp-aquahygiene.de